



綺麗なメガネって? | 綺麗なメガネを見る | 取り扱い店舗一覧

お知らせ

お知らせ

- 2008.08.30 臨時メンテナンスのお知らせ(7月1日(火)PM1.00~)
- 2008.08.11 サングラスを掲載しました。
- 2008.09.13 シリーズ新登場
- 2008.09.10 在庫ホームページ上で「生ですかコン」で綺麗なメガネ「Fit-Slim」をご紹介いたがきます。
- 2008.03.17 Fit-Slim版「Fit-スリム」を公開します。
- 2008.03.05 Fit-miss手先行公開致します。

FTTシリーズ一覧

● 鼻の太い顔型メガネ

Fit-Nopad(Old) 詳細を見る 商品を見る	Fit-NopadM 詳細を見る 商品を見る	Fit-NopadX 詳細を見る 商品を見る	Fit-NopadL 詳細を見る 商品を見る
Fit-NopadA 詳細を見る 商品を見る	Fit-MoonZ 詳細を見る 商品を見る	Fit-NopadZ 詳細を見る 商品を見る	Fit-NopadJ 詳細を見る 商品を見る

● 顔の上げ顔型メガネ

Fit-UP 詳細を見る 商品を見る	Fit-UPN 詳細を見る 商品を見る	Fit-UPIIP 詳細を見る 商品を見る	Fit-UPL/U 詳細を見る 商品を見る
Fit-UP+8 詳細を見る 商品を見る	Fit-UPT 詳細を見る 商品を見る		

● 顔を変換したメガネ

Fit-ZeroG 詳細を見る 商品を見る	Fit-ZeroGS 詳細を見る 商品を見る	Fit-ZeroGT 詳細を見る 商品を見る
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

● 顔の広い顔型メガネ

Fit-Gold
詳細を見る 商品を見る

● 子供用メガネ

Fit-School 詳細を見る 商品を見る	Fit-SchoolII 詳細を見る 商品を見る	Fit-Guard 詳細を見る 商品を見る	Fit-Jr. 詳細を見る 商品を見る
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

- ① >加盟店のはこちらをクリック。
- ② 加工したいフレームを選択。

綺麗なメガネ

HOME お問い合わせ > お客さまはこちら

HOME | 初めての方へ | デザイナー一覧 | サポート

HOME > 加盟店のお客さまトップ > デザイナー一覧 > 詳細

<< 元に戻る



拡大画像を見る

FC #A114008
(玉型: A114)

小売価格: 11,300 円
*レンズ代・深溝カラー代(2,000円)は含まれておりません。
(Fit-Loupe・UPS・UPLはレンズ込の価格です。)

サンプル注文する

ダウンロードページに進む

メガネの詳細

カラー: 茶、タイプ: 女性用、ブリッジ: S、ヨロイ: FU、種別: 遠近両用OK、無重量な軽さ、累計DL数: 498

加工時の情報

<使用ネイルカラー>

メイベリンマイサロン 308 メイベリン(株)
マキアージュネイルカラー GD827 (株)資生堂

<加工時の情報>

内寄量を計算する

別Window


	DBL	PD	高さ	サイズ	溝加工の深さ
溝掘り玉型	17	74	0	54	2.2mm
仕上げ用玉型	17	70.5	0		

<加工時の情報>で、事前に内寄量を計算しておく。


- ③ **ダウンロードページに進む** をクリック。

21netサインイン

※新サーバーではこちらのサインイン画面を使用することとなりました。
いつものユーザー名とパスワードでサインインしてください。



ユーザー名とパスワードの確認



ワン太

ユーザー名:

パスワード:

④ ユーザー名：パスワード：を入力後、サインインをクリック。

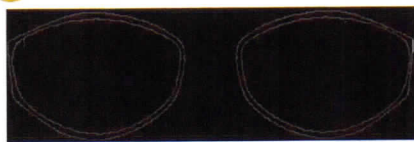
綺麗なメガネ

[HOME](#) [お問い合わせ](#) [お客さまはこちら](#)

[HOME](#) | [初めての方へ](#) | [デザイナー一覧](#) | [サポート](#)

[HOME](#) > [眼鏡店のお客さまトップ](#) > [デザイナー一覧](#) > [詳細](#) > [ダウンロードページ](#)

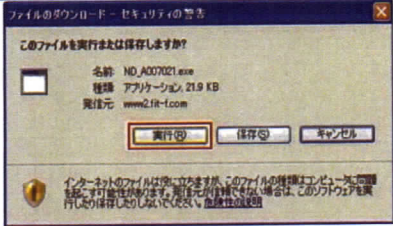
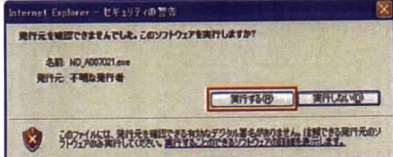
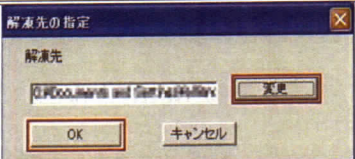
玉型データダウンロード



A114008のダウンロード:

ニデックユーザー	トプコンユーザー	タクボユーザー
<input type="button" value="Download"/>	<input type="button" value="Download"/>	<input type="button" value="Download"/>

ダウンロード手順(ダウンロードするまで) : [ご使用のトレーサー機種を選択してダウンロードして下さい](#)
[玉型ダウンローダーインストールはこちら](#)

<div style="text-align: center;"> <p>ニデックユーザー トプコンユーザー タクボユーザー</p> <p style="margin: 0;"><input type="button" value="Download"/> <input type="button" value="Download"/> <input type="button" value="Download"/></p> <p>ご使用のトレーサー機種の「Download」をクリックして下さい。</p> </div>	<p>1.必要なメーカー名下のボタンをクリックします。 自己解凍型の圧縮ファイルです。 以下の方法で、任意の場所に保存できます。</p>
	<p>2.ファイルのダウンロード方法を選択する画面が表示されます。 [実行]ボタンをクリックします。</p> <p>※[保存]を選択すると、「名前をつけて保存」画面が表示されます。任意の場所に保存後、該当のexeファイルをダブルクリックで実行してください。 以下、4へ。(実行したexeファイルはもう使いませんので、削除してください。)</p>
	<p>3.セキュリティ警告が表示される場合は、「実行する」ボタンを押して続行してください。</p>
	<p>4.[変更]ボタンを押すと、ファイルを保存する場所を指定する画面が表示されます。 保存する場所を任意で指定し、[OK]ボタンをクリックします。</p>
<p>ダウンロードされるデータは、 ・深漬カラー用の場合は2つ ・ラインカラー用の場合は1つ です。</p> <p>例) 品番A001001のニデックの玉型データが必要な場合</p>	

⑤ 最初に、[玉型ダウンローダーインストールはこちら](#)をクリック。(初回のみ)

綺麗なメガネ

HOME お問い合わせ お客様はこちら

HOME | 初めての方へ | デザイン一覧 | サポート

HOME > 店舗店のお客様サポート > サポート > 玉型ダウンローダー インストール方法

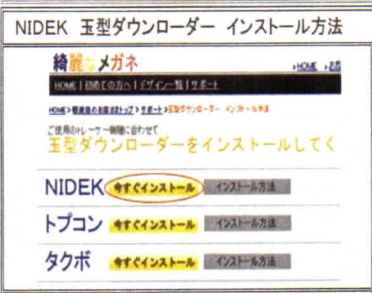


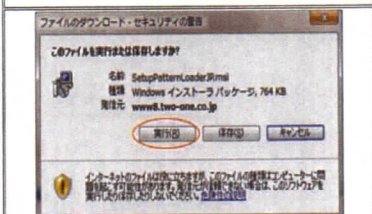
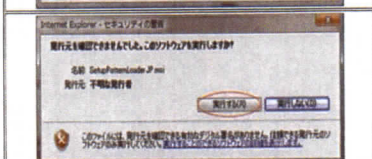
ご使用のトレーサー機種に合わせて

玉型ダウンローダーをインストールしてください

NIDEK [今すぐインストール](#) [インストール方法](#)

トプコン [今すぐインストール](#) [インストール方法](#)

タクボ [今すぐインストール](#) [インストール方法](#)

NIDEK 玉型ダウンローダー インストール方法	
	<p>1.インストール開始</p> <p>NIDEKの隣にある「今すぐインストール」ボタンをクリックします。</p>
	<p>2.「保存」をクリック。 (保存先はデスクトップに指定する)</p> <p>★警告メッセージが表示された場合は、「操作」を選択し、「実行」をクリックしてください。</p> <p>★解凍先指定が表示された場合は、「変更」をクリックし、デスクトップに指定してください。</p> <p>デスクトップに「tgd500.EXE」ファイルが出来るので、右クリック⇒[開く]をクリックし、解凍する。</p>
	<p>3.ファイルを開く。</p> <p>解凍後、デスクトップに「tgd500」フォルダが出来るので、開く。 [install.exe]をダブルクリックする。</p> <p>※ユーザー アカウント制御が表示された場合は「続行」をクリック。</p>
	<p>4.ファイルのダウンロードダウンロードを開始すると、「セキュリティの警告」がでてきます。 [実行]をクリックしてください。</p>
	<p>5.セキュリティの警告「セキュリティの警告」が出る場合があります。 [実行する]をクリックし、指示に従い[次へ]を押してください。</p>
	<p>6.セットアップウィザード画面</p>

https://www.9.two-one.co.jp/fitcreator/tamagataD.nsf/pdlhow

2015/03/27

⑥ トプコン [今すぐインストール](#) を選択し、インストーラーをダウンロード。

※詳細は、玉型ダウンローダーインストール方法を確認下さい。

ダウンロードが完了するとデスクトップに FR トランスファースフトのアイコンが作成されます。

※完了後、玉型データを保存するフォルダーを任意で、新規に作成しておきます。

⑦ ダウンロードページに戻りトプコンユーザー [Download](#) をクリックし、解凍先を先程作成した新規フォルダーを指定しダウンロード。(次回からは、ここから始めます)

⑧PC のデスクトップに出来た FR トランスファーソフトのアイコンをクリック。

をクリックし、保存したフォルダー先から玉型データを選択し をクリック。

玉型データの形状が表示されます。

深浅カラーの場合は、玉型データが二つあります。(溝堀加工用、平仕上加工用)

例：A114008_1.tff (溝堀用)

A114008_2.tff (平仕上用)

※ALE-5000 と PC をあらかじめ RS-232C (クロス) ケーブルで接続しておく必要があります。

その際は、PC の COM ポート No と FR トランスファーソフトの COM ポート No を合わせます。

COM ポートの指定は、FR トランスファーソフトのツールの中で指定します。

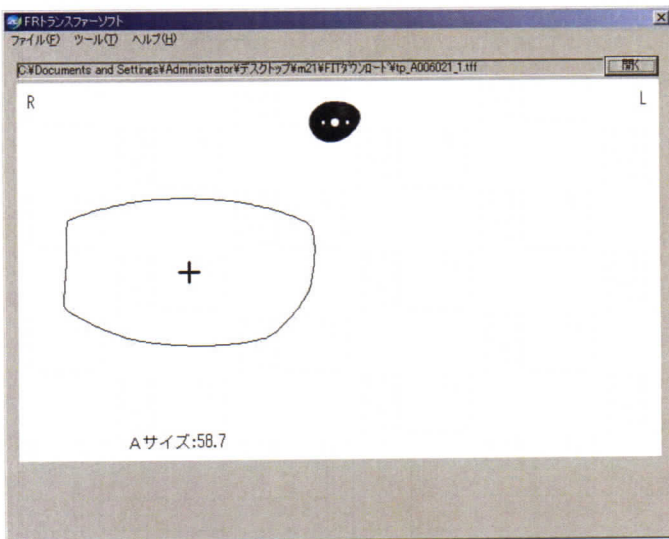
※加工レンズの吸着位置は、必ず加工時の情報で計算した内寄量に元付き偏芯吸着をして下さい。

深淺加工の操作

パターンレスエッジャー ALE-5000、5100 シリーズ

1. 平加工（溝掘り用）

- ① PCで、「FRトランスファーソフト」を使い、「溝掘り加工用の玉型データ」を選択します。
PCの画面上に溝掘り加工用の玉型形状が表示されます。



- ② 「データ要求」スイッチを押して、溝掘り加工用の玉型データを転送します。PCからALE-5100へデータが転送されます。

- ③ 溝掘り加工用の加工条件を設定します。

・「F3フレームタイプ」スイッチには、「平」を選択します。

・FPD、PD、UPを指定の条件に合わせます。

※処方するPDは、必ず偏芯吸着して下さい。

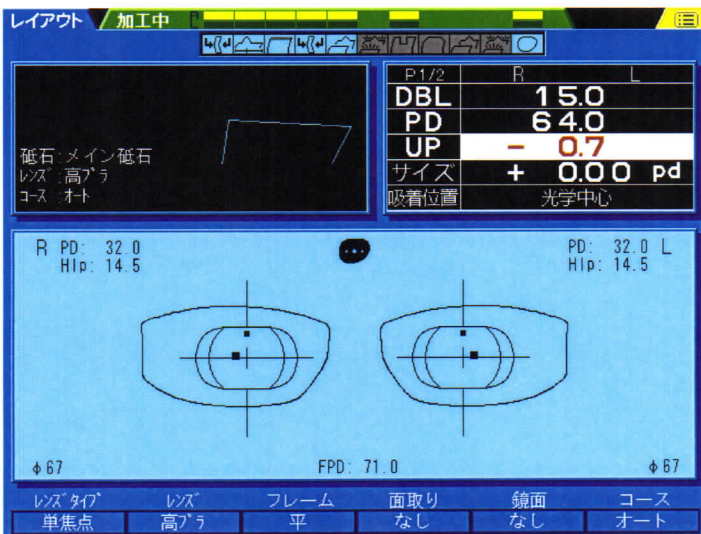
- ④ 生地レンズをクランプし、右レンズは「右」スイッチ、左レンズは「左」スイッチを押して加工をスタートします。
- ⑤ 反対眼のレンズの加工も行います。

2. 溝堀加工をします

- ⑥ 加工の終わったレンズを溝堀器にてデータの指定の深さに溝堀加工をします。

3. 平仕上げ加工をします

- ⑦ PCで、「FR トランスファソフト」を使い、「平仕上げ加工用の玉型データ」を選択します。PCの画面上に平仕上げ加工用の玉型形状が表示されます。
- ⑧ 「データ要求」スイッチを押して、平仕上げ加工用の玉型データを転送します。
- ⑨ PCから ALE-5100 へデータが転送されます。
- ⑩ 平仕上げ加工用の加工条件を設定します。(FPD、PD、UP)



・「F3 フレームタイプ」スイッチには、「平」を選択します。

- ⑪ 溝掘り加工後のレンズをクランプし、右レンズは「右」スイッチ、左レンズは「左」スイッチを押して加工をスタートします。
- ⑫ 加工終了。